



ANTÍGENO EN 3 PASOS (A3P) INSTRUCCIONES PARA EL USO CORRECTO



¿DE QUÉ SE TRATA?

Es una herramienta de diagnóstico para COVID-19, mediante una prueba de antígeno auto aplicable cuyo resultado debe ser reportado una vez obtenido

1 RECIBE tu prueba de antígeno y **ANOTA** las indicaciones entregadas por la Autoridad Sanitaria

2 TESTÉATE según el presente instructivo

3 AUTOREPORTA tu resultado en la página <https://seremienlinea.minsal.cl>



RECOMENDACIONES PREVIAS



Limpia y seca el área donde posicionarás el kit de testeo.



Lava tus manos previamente con agua y jabón durante 20 segundos.



Revisa aquí el video tutorial

Abre tu kit de testeo y saca todos los implementos:



- ① Dispositivo de prueba (caset)
- ② Tubo con el buffer
- ③ Hisopo
- ④ Soporte para el tubo


PASOS DE AUTOTESTEO

1 Saca el caset de su envoltorio. Arma el soporte y posiciona el tubo en el orificio de la caja. Saca el hisopo de su envoltorio.



Sin tocar la punta blanda, introduce el hisopo en una fosa nasal. Asegúrate de que toda la punta esté dentro (1,5 cm aprox).

2

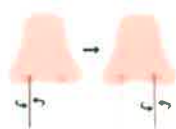

Enrolla el hisopo 5 veces dentro de la fosa nasal y repite el proceso en la otra fosa nasal (con el mismo hisopo). Retira con cuidado.

3

- 4** Abre el tubo e introduce el hisopo en el tubo hasta el líquido.
- 5** Gíralo 5 veces mientras presionas el cabezal contra la parte inferior y lateral del tubo de extracción.
- 6** Retira el hisopo mientras aprietas los lados del tubo para extraer el líquido.
- 7** [Image of the test cassette]
- 8** Tapa el tubo. Ubica el dispositivo de prueba en una superficie nivelada y con el gotero introduce 3 gotas al caset.
- 9** Espera 15 minutos y lee el resultado.

RESULTADOS

RESULTADO POSITIVO



Líneas de test (T) y control (C) marcadas.

RESULTADO NEGATIVO



Sólo línea de control (C) marcada.

RESULTADO INVÁLIDO



Sólo línea de test (T) marcada.



Si el resultado es positivo, tómale de inmediato una foto. Deberás adjuntarla cuando te auto reportes

